




Surgisis® Biodesign™

ZATYCZKA DO PRZETOK

Odzyskaj dawną jakość życia.

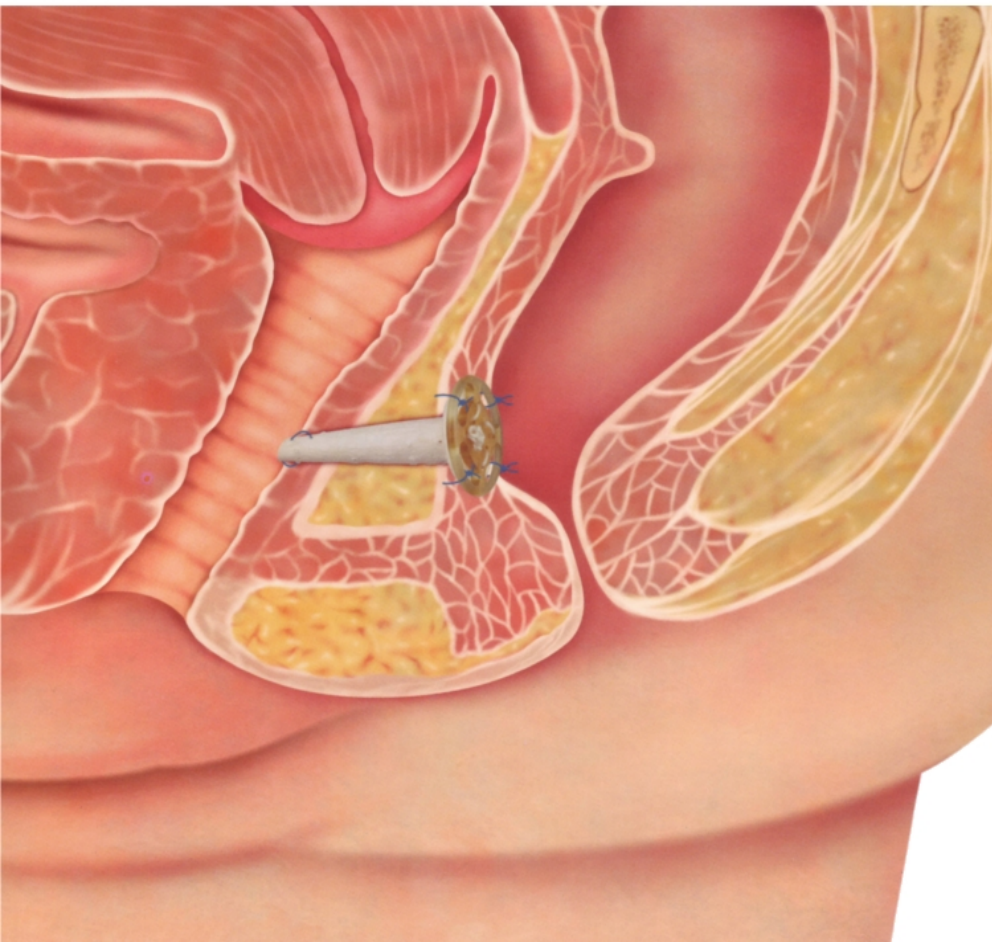

Kobiety cierpiące na przetokę odbytniczo - pochwą doświadczają bolesnych i krępujących objawów które całkowicie zmieniają jakość ich życia. Wiele z tych kobiet nie ujawnia swoich dolegliwości i jest całkowicie nieświadomych istnienia ich prostego rozwiązania.

Zatyczka przetoki Surgisis® Biodesign™ zapewnia rozwiązanie pozwalające na zamknięcie przetoki. Surgisis® Biodesign™ komunikuje się z organizmem pacjentki, dając sygnał otaczającym ją komórkom do budowania „rusztowania” na swojej podstawie. Rezultatem jest całkowicie przebudowana, unaczyniona tkanka i całkowite zamknięcie przetoki. Co więcej, Surgisis® Biodesign™ oferuje najlepsze aspekty przeszczepu biologicznego – naturalne przebudowanie i odporność na infekcje – jednocześnie oferując łatwość użycia i natychmiastową dostępność.

Zatyczka przetoki Surgisis® Biodesign™ została zaprojektowana specjalnie w sposób pozwalający na dopasowanie się do szerokiego wachlarza rozmiarów kanału przetoki odbytniczo – pochwowej.

Globalny numer produktu	Numer zamówienia	Rozmiar cm
Zatyczka przetoki		
G48651	C-RVP-0.2	0,2
G48652	C-RVP-0.4	0,4
G48653	C-RVP-0.7	0,7
4 warstwowy graft tkankowy		
G13181	C-SLH-4S-4X7	4 x 7
G12580	C-SLH-4S-7X10	7 x 10

4 warstwowy graft tkankowy Surgisis® Biodesign™ jest alternatywą dla przetoki odbytniczo – pochwowej o średnicy większej niż 8 mm i krótszej niż 1 cm.



Funkcje i korzyści

- Łatwa do ponownego uwodnienia i przyszcicia.
- Wytwarza funkcjonującą, żywą tkankę.
- Przywraca naturalną formę i funkcje.

Porady

- Użyj rozmiaru zatyczki który ściśle dopasuje się do przetoki. Dla przetoki o wielkości 1 do 2 mm zaleca się użycie zatyczki 2 mm. Dla przetoki od 2 do 4 mm użyj zatyczki 4 mm, dla przetoki od 4 do 7 mm, użyj zatyczki 7 mm.
- Delikatnie usunąć nieunaczynioną tkankę z kanału przetoki przy pomocy zgłębnika lub małej szczoteczki.
- Umieść szwy wchłaniające na otocze od strony odbytu.
- Po zabiegu, pacjentka powinna ograniczyć aktywność fizyczną do spokojnego spaceru. Odradza się odbywanie stosunków płciowych i innych form penetracji pochwy/odbytnicy przez okres co najmniej 6 tygodni po zabiegu.